






# Umgang mit einer Roger Anlage

## Roger Touchscreen Mic








- On/Off 
- Aufladen 
- Voll aufgeladen 
- Stumm 
- Primary nicht verfügbar 



0 - 10 cm



## Roger Pass-around

-  On/Off
-  Aufladen
-  Voll aufgeladen
-  Stimme Übertragung
-  Stumm
-  Mikrofon Standby
-  Primary nicht verfügbar

Tippen Sie auf **Verbinden**, um das Gerät zum Netzwerk hinzuzufügen

## Positionierung des Touchscreen Mic



-  Das Touchscreen Mic wird so um den Hals gehängt, dass das Display sichtbar ist. Die Länge der Schlaufe sollte so eingestellt sein, dass das Touchscreen Mic frei im Brustraum hängt.
-  Keine Schals oder lange Ketten verwenden, diese führen zu Störgeräuschen oder Dämpfungen.

## Touchscreen Mic in Gruppenarbeiten



-  Während Gruppenarbeiten hängt das Touchscreen Mic um den Hals und bleibt stumm geschaltet. Die Handmikrofone können weiterhin benutzt werden.
-  Wird das Touchscreen Mic abgelegt, dann werden auch die Handmikrofone deaktiviert.

## Do's & Don'ts

### Sprechen mit dem Handmikrofon

-  Beim Sprechen immer das Handmikrofon verwenden. Dieses ruhig und nah an den Mund halten (ca. 5 – 10 cm). Der **grüne Ring** zeigt, wenn das Mikrofon das Gesprochene aufnimmt. Dies funktioniert automatisch.
-  Eine laute Stimme ersetzt das Handmikrofon nicht. Nur über das Handmikrofon wird das Gesprochene an die Hörtechnik übertragen.

### Hinlegen des Handmikrofons

-  Nach dem Sprechen sollte das Mikrofon vorsichtig auf den Tisch gelegt werden. Das Mikrofon schaltet sich automatisch stumm, was an dem **rot blinkenden Kreis** erkennbar ist.
-  Beim Rollen erzeugt das Handmikrofon Störgeräusche.